



Sonda de Sengstaken-Blakemore

MedFirst suministra sondas de Sengstaken-Blakemore con marcado CE

La sonda de PVC de tres luces C120PVCS, fabricada por Marquat, se fabrica en Francia y está disponible en cuatro tamaños, desde pacientes pediátricos hasta adultos. Se suministra en cajas de 5 unidades.



Sonda de Sengstaken-Blakemore de PVC de 3 luces, Ref. C120PVCS (Marquat)

La C120PVCS es una sonda graduada de tres luces que combina un cuerpo de PVC con dos balones de látex natural.

Un lumen está destinado a la aspiración gástrica, mientras que los otros dos se utilizan para el inflado del balón esofágico y del balón gástrico.

Está indicada para la hemostasia de las varices esofágicas sangrantes mediante taponamiento mecánico, en situaciones de urgencia en las que los tratamientos convencionales de primera línea hayan fracasado o no estén disponibles.

El balón esofágico inflado ejerce una compresión directa sobre las varices, mientras que el balón gástrico (cardial) fija la sonda contra el fundus gástrico y mantiene su correcta posición.

Referencia	Paciente	Longitud mín	Diámetro exterior	Tamaño	Balón esofágico	Balón gástrico
C12014PVCS	Lactante	60 cm	aprox. 4,60 mm	14 CH	15 mL máx.	40 mL máx.
C12016PVCS	Niño	100 cm	aprox. 5,30 mm	16 CH	25 mL máx.	50 mL máx.
C12018PVCS	Adulto	100 cm	aprox. 6,00 mm	18 CH	35 mL máx.	100 mL máx.
C12020PVCS	Adulto	125 cm	aprox. 6,60 mm	20 CH	50 mL máx.	150 mL máx.

Dimensiones de los balones

Diseño y materiales

- Cuerpo de PVC con línea radiopaca continua
- Dos balones de látex natural (esofágico y gástrico)
- Marcas de profundidad para controlar la inserción
- Canal gástrico de triple puerto para lavado y evacuación de sangre
- Dos canales de inflado con balones piloto y conectores Luer hembra bloqueables
- Collar deslizante para la fijación mediante tracción
- Tiempo máximo de permanencia: 48 horas (2 días)
- Presentación: caja de 5 unidades
- Estéril y de un solo uso (irradiación beta, 25 kGy)
- No reesterilizar
- Fabricado en Francia (marcado CE desde 1998)
- Producto sanitario de Clase IIa
- Marcado CE conforme a la Directiva 93/42/CEE y comercializado actualmente conforme a las disposiciones transitorias del artículo 120(3) del Reglamento (UE) 2017/745, modificado por el Reglamento (UE) 2023/607
- Fabricante certificado según ISO 13485 (GMED, Organismo Notificado 0459)
- SRN: FR-MF-000014282

Volúmenes de inflado

La C120PVCS se especifica únicamente mediante los volúmenes de inflado. El fabricante no establece una presión nominal, máxima ni recomendada para los balones.

La presión ejercida sobre los tejidos depende del volumen inyectado, de la elasticidad del balón, de la anatomía del paciente y de la tracción aplicada a la sonda. Debe evitarse el sobreinflado y el traumatismo esofágico. Consulte las instrucciones de uso del fabricante.

Látex natural

Los balones de esta sonda están fabricados con látex natural. No utilizar en pacientes con alergia conocida al látex.

Lubrication

No utilizar lubricantes grasos ni vaselina, ya que pueden dañar los balones de látex. Se recomienda utilizar un gel o una emulsión de silicona. Consulte las instrucciones de uso del fabricante.

Referencia	Balón esofágico	Balón gástrico
C12014PVCS	aprox. 74 mm	aprox. 43 mm
C12016PVCS	aprox. 98 mm	aprox. 45 mm
C12018PVCS	aprox. 110 mm	aprox. 54 mm
C12020PVCS	aprox. 140 mm	aprox. 68 mm