



Sonda di Sengstaken-Blakemore

MedFirst fornisce sonde di Sengstaken-Blakemore marcate CE

La sonda in PVC a tre lumi C120PVCS, prodotta da Marquat, è fabbricata in Francia ed è disponibile in quattro misure, dal paziente pediatrico all'adulto. È fornita in confezioni da 5 pezzi.



Sonda di Sengstaken-Blakemore in PVC a 3 lumi, Rif. C120PVCS (Marquat)

La C120PVCS è una sonda graduata a tre lumi composta da un corpo in PVC e due palloncini in lattice naturale.

Un lume è dedicato all'aspirazione gastrica, mentre gli altri due sono destinati al gonfiaggio del palloncino esofageo e del palloncino gastrico.

È indicata per l'emostasi delle varici esofagee sanguinanti mediante tamponamento meccanico, nelle situazioni di emergenza in cui i trattamenti convenzionali di prima linea abbiano fallito o non siano disponibili.

Il palloncino esofageo gonfiato esercita una compressione diretta sulle varici, mentre il palloncino gastrico (cardiale) ancora la sonda al fondo gastrico mantenendola nella corretta posizione.

Riferimento	Paziente	Lunghezza min	Diametro esterno	Misura	Palloncino esofageo	Palloncino gastrico
C12014PVCS	Lattante	60 cm	Circa 4,60 mm	14 CH	15 mL máx.	40 mL máx.
C12016PVCS	Bambino	100 cm	Circa 5,30 mm	16 CH	25 mL máx.	50 mL máx.
C12018PVCS	Adulto	100 cm	Circa 6,00 mm	18 CH	35 mL máx.	100 mL máx.
C12020PVCS	Adulto	125 cm	Circa 6,60 mm	20 CH	50 mL máx.	150 mL máx.

Dimensioni dei palloncini

Progettazione e materiali

- Corpo in PVC con linea radiopaca continua
- Due palloncini in lattice naturale (esofageo e gastrico)
- Tacche di profondità per il controllo dell'inserimento
- Canale gastrico a triplo lume per lavaggio ed evacuazione del sangue
- Due canali di gonfiaggio con palloncini pilota e connettori Luer Lock femmina
- Collare scorrevole per il fissaggio mediante trazione
- Tempo massimo di permanenza: 48 ore (2 giorni)
- Confezione da 5 pezzi
- Sterile e monouso (irradiato beta, 25 kGy)
- Non risterilizzare
- Prodotto in Francia (marcatura CE dal 1998)
- Dispositivo medico di Classe IIa
- Marcato CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e attualmente commercializzato secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 120(3) del Regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/607
- Fabbricante certificato ISO 13485 (GMED, Organismo Notificato 0459)
- SRN: FR-MF-000014282

Volumi di gonfiaggio

La C120PVCS è specificata esclusivamente in base ai volumi di gonfiaggio. Il fabbricante non dichiara alcuna pressione nominale, massima o raccomandata per i palloncini. La pressione effettivamente esercitata sui tessuti dipende dal volume iniettato, dalla compliance del palloncino, dall'anatomia del paziente e dalla trazione applicata alla sonda. Prestare attenzione a evitare il sovragonfiaggio e i traumi esofagei. Consultare le istruzioni per l'uso del fabbricante.

Lattice naturale

Los balones de esta sonda están fabricados con látex natural. No utilizar en pacientes con alergia conocida al látex.

Lubrificazione

Non utilizzare lubrificanti grassi o vaselina, poiché potrebbero danneggiare i palloncini in lattice. Utilizzare un gel o un'emulsione a base di silicone. Consultare le istruzioni per l'uso del fabbricante.

Riferimento	Palloncino esofageo	Palloncino gastrico
C12014PVCS	circa 74 mm	circa 43 mm
C12016PVCS	circa 98 mm	circa 45 mm
C12018PVCS	circa 110 mm	circa 54 mm
C12020PVCS	circa 140 mm	circa 68 mm