

MEDFIRST

KIT DE CRICOTHYROTOMIE

APERÇU DE NOTRE KIT D'URGENCE RESPIRATOIRE

Notre kit certifié CE est spécialement conçu pour être utilisé dans des situations d'urgence, notamment lors de CICO (Can't Intubate, Can't Oxygenate), lorsque l'accès aux voies respiratoires de manière conventionnelle est restreint.



Cet ensemble est destiné aux cas nécessitant une voie aérienne d'urgence à l'avant du cou, il permet la création d'une ouverture dans la trachée par la cricothyrotomie, garantissant ainsi une ventilation et une oxygénation immédiates du patient.

Ce kit est en stricte conformité avec les directives de la DAS (Difficult Airway Society) de 2015.

PRINCIPAUX ATOUTS DU SET :

Rapidité et efficacité : Ce kit permet une intervention d'urgence extrêmement rapide, aidant à restaurer la respiration du patient en quelques minutes seulement.

Sécurité maximale : Chaque composant est soigneusement sélectionné pour garantir une procédure de cricothyrotomie sûre et efficace, minimisant les risques de complications.

Facilité d'utilisation : Les instructions graphiques claires vous guident à travers chaque étape de la procédure.

Matériel de référence stérile : Chaque kit est livré dans un emballage rigide à usage unique pour préserver la stérilité et protéger les composants de tout dommage ou déformation.

CRICOTHYROTOMIE : LES PIÈCES INCONTOURNABLES :

- **Scalpel de taille 10 :** Offre une précision chirurgicale pour une incision nette, permettant un accès rapide à la membrane cricothyroïdienne.
- **Introducteur :** Souvent sous forme de bougie d'intubation, il joue un rôle crucial en guidant le tube de trachéotomie dans la trachée après l'incision.
- **Tube de trachéotomie :** Équipé d'un brassard de taille 6,0, il garantit une ventilation efficace grâce à un ajustement sécurisé, prévenant ainsi les fuites d'air indésirables.
- **Seringue de 10 ml :** Utilisée pour ajuster et vérifier la position précise de l'outil.
- **Ruban de coton :** Utilisé pour fixer solidement le tube de trachéotomie en place, évitant tout mouvement non désiré et assurant une ventilation stable du patient.



Retrouver notre produit avec des détails complémentaires sur sa [page dédiée](#).

Pour plus d'informations, contactez-nous

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care