


KIT D'EXTRACTION DE TIGES DE HANCHE

Présentation :

Notre kit d'extraction se compose de trois éléments essentiels pour retirer les tiges de hanche lors d'une chirurgie de reprise : un adaptateur, une masselotte et une tige de masselotte.

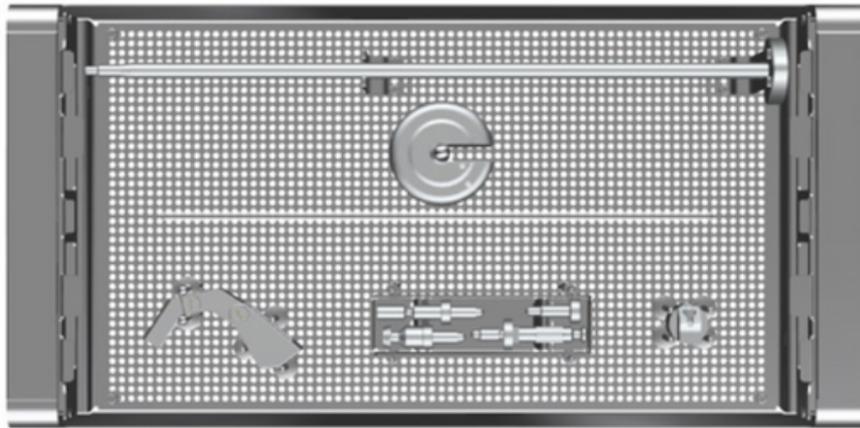


Mode d'emploi :

L'opération utilise l'extracteur de tige conçu pour le cône 12/14 et peut être combiné avec différentes poignées.

Cet extracteur est spécialement conçu pour permettre l'utilisation de divers manchons de râpe ou d'une tige d'extraction avec un poids de frappe.


Les deux trous filetés situés dans un angle en forme de U facilitent le retrait de la tige dans l'axe.

L'élément central de ce dispositif est l'extracteur de tige (figure 1), qui permet de connecter la tige de la hanche à différents éléments.

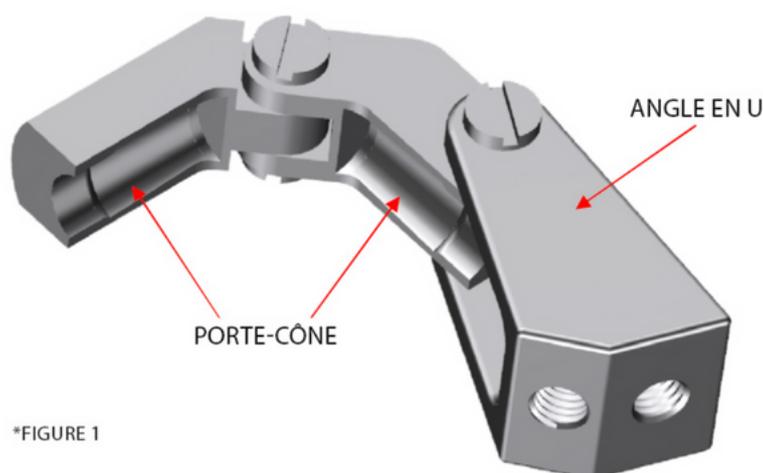

Avant d'utiliser une poignée d'extraction, il faut toujours commencer par fixer l'extracteur au cône de la tige de hanche :

Pliez l'extracteur de tige comme indiqué dans la figure 2. Positionnez l'instrument au-dessus du cône de la tige de la hanche et vérifiez si le cône est suffisamment saisi lorsque les mâchoires métalliques sont poussées l'une contre l'autre.

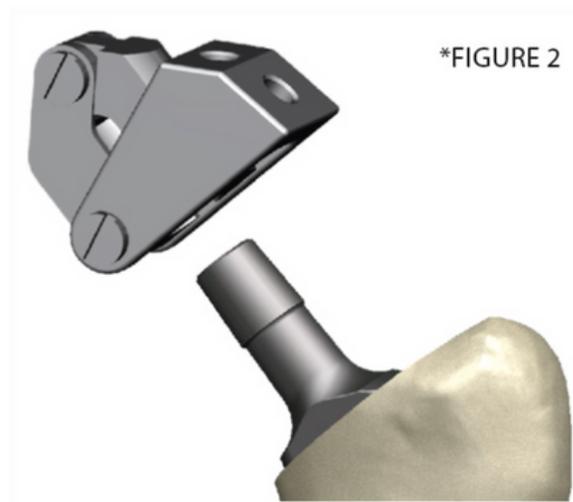

En alignant l'axe de la tige d'extraction avec celui de la tige de hanche, insérez la tige d'extraction dans l'un des deux trous de forage de l'extracteur de tige jusqu'à ce que le cône soit solidement positionné (Figure 3).

Il est recommandé de veiller à ce que l'axe de la tige d'extraction et celui de la tige de hanche soient alignés dans la même direction, afin d'optimiser les résultats de la procédure.

Enfin, connectez le poids de frappe modulaire à la tige d'extraction (Figure 3).



Vous pouvez retrouver ce produit au sein de notre site Internet [ci-joint](#), des détails supplémentaires sur l'instrument y sont présent ainsi que la possibilité d'effectuer une demande de devis.

Pour plus d'informations, contactez-nous
MEDFIRST