

PRÉSENTATION :

La sonde post-partum est un dispositif médical de classe **Ila** marqué **CE**, à usage unique, utilisé en gynécologie.

Elle se compose d'un cathéter muni d'un ballon et a pour objectif de contrôler les hémorragies de l'utérus et du vagin.



DESCRIPTION :

Le dispositif ne contient ni phtalates (perturbateur endocrinien), ni latex, est 100% en silicone et assure le confort du patient. Il ne nécessite aucune opération chirurgicale pour être retiré.

Le ballon de tamponnement en forme de poire est parfaitement adapté à l'anatomie de l'utérus.

Kit équipé d'un clapet anti-retour, accompagné de deux seringues fournies pour gonfler rapidement le ballon, en effet, il peut absorber jusqu'à 4.000 ml d'eau saline.

Il a également un tube à trois voies pour un gonflage facile, sûr et rapide.

AVANTAGES DU BALLON DE TAMPONNEMENT POST-PARTUM :


La forme en poire est plus adaptée à l'utérus, permettant ainsi un blocage en place et une pression uniforme sur toute sa surface interne.

La sonde ne comporte pas de protubérance à l'extrémité distale qui pourrait blesser l'utérus.

Le Post-partum a une capacité de rétention de 4 litres, au contraire des ballons des concurrents qui ne peuvent retenir généralement que 2 litres.

L'orientation du canal de collecte du sang vers l'intérieur facilite le transit du sang coagulé.

Lorsqu'il est rempli, le cathéter se bloque grâce à sa forme qui est en parfait alignement avec celle de l'utérus.

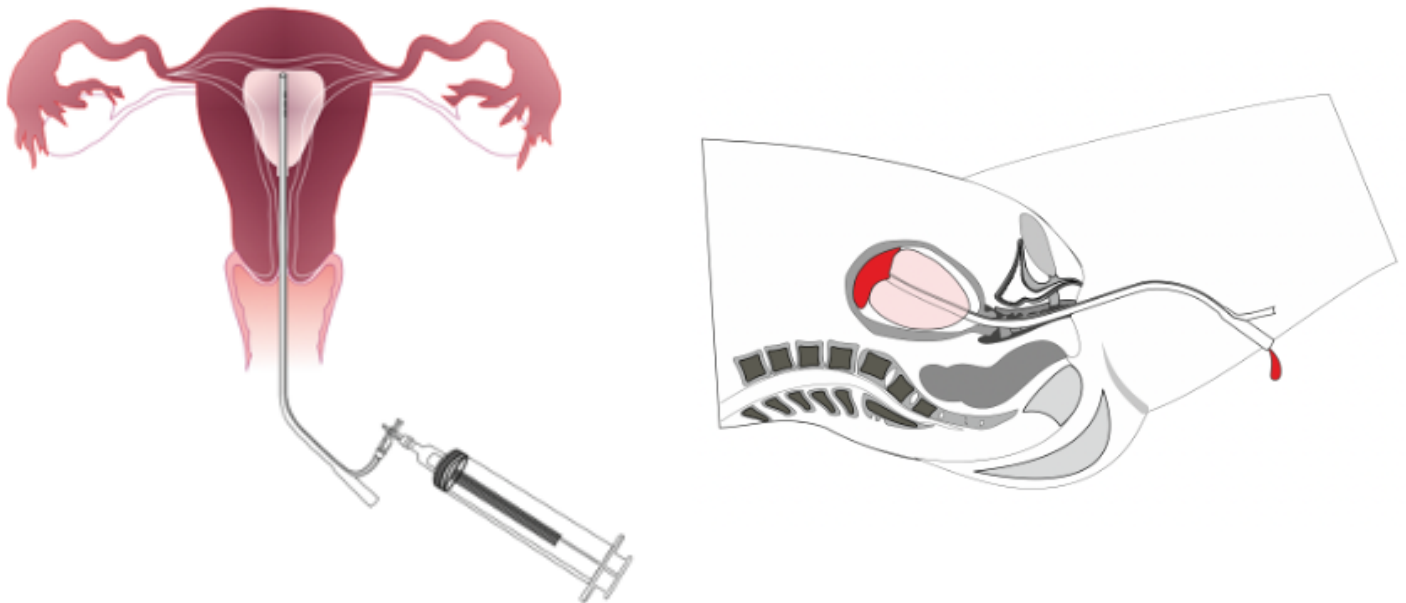

PRÉCAUTIONS :

Cathéter stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
Inspecter soigneusement l'emballage stérile avant de l'ouvrir. Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé.

Utiliser le dispositif avant la date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette du produit.
Stocker dans un environnement sec.

Découvrez notre produit sur notre site internet **PRPFirst** ainsi que sur **sa page dédiée**, où vous trouverez des informations sur ses caractéristiques techniques, sur son gonflage et sa mise en place.

Pour plus d'informations, contactez-nous

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care