

DECONTAMINATION, NETTOYAGE et STERILISATION

Pour les dispositifs médicaux non implantables fabriqués en acier inoxydable (Kit d'extraction de vis)

Avertissement : Les recommandations qui vont suivre ne se substituent en aucun cas aux protocoles transmis par les fournisseurs de désinfectant, nettoyeurs et fabricants d' autoclaves ou aux recommandations du CLIN local de chaque établissement de santé. Néanmoins, le descriptif sommaire ci-dessous a pour unique but de sensibiliser le client sur les grandes étapes qui lui seront proposées pour stériliser ses INSTRUMENTS CHIRURGICAUX.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignement. Notre équipe est à votre disposition pour une réponse rapide et personnalisée.

Vous pouvez aussi retrouver la description complète sur www.medfirst.care.

CONSIGNES GÉNÉRALES

- ✓ Nettoyer, désinfecter et stériliser les INSTRUMENTS CHIRURGICAUX neufs avant leur première utilisation.
- ✓ Nettoyer, désinfecter et stériliser les INSTRUMENTS CHIRURGICAUX aussi rapidement que possible après leur utilisation.
- ✗ Mettre de côté les INSTRUMENTS CHIRURGICAUX usés, corrodés, déformés ou présentant un quelconque endommagement et les renvoyer à Medfirst.
- ✓ Traiter à part les INSTRUMENTS CHIRURGICAUX de microchirurgie.

NETTOYAGE, DÉSINFECTION

- ✓ Respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures recommandés dans les protocoles validés pour la désinfection et le nettoyage
- ✗ L'**usage de l'eau de javel** sur les instruments en aciers inoxydables est **interdit** afin d'éviter la corrosion des instruments.
- ✓ Eviter les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zone d'ombre.
- ✓ Ouvrir les instruments articulés pour le nettoyage et la décontamination
- ✗ Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel.
- ✓ Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible
- ✓ Sécher les INSTRUMENTS CHIRURGICAUX avec soin après le rinçage.

STÉRILISATION

- ✓ Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins un complément indispensable.
- ✓ Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide:
 - Température: 134°C
 - Pression: 2 bars
 - Durée: 18 minutes
- ✓ Valider les charges de stérilisation par du personnel compétent selon les procédures validées par le CLIN.

N'hésitez pas à [nous contacter](#) pour toute demande de renseignement. Notre équipe est à votre disposition pour une réponse rapide et personnalisée.

Vous pouvez aussi retrouver la description complète sur www.medfirst.care

MEDFIRST

8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, France - RCS Toulouse B 831156641



+33 5.32.63.00.14



ventes@medfirst.care



www.medfirst.care